

FICHE TECHNIQUE MASQUE DE TYPE 1

NORME : EN 14683:2019+AC:2019



**EFFICACITÉ DE FILTRATION
BACTÉRIENNE : $\geq 95\%$**

**BACTERIAL FILTRATION
EFFICIENCY : $\geq 95\%$**

Structure & composition

Le masque est composé d'un tissu non tissé filé-lié, d'élastiques et d'une pince nasale. Il est principalement fabriqué par découpage, couture ou thermoscellage en utilisant comme matière première un tissu non tissé.
The mask is composed of spunbonded non-woven fabric, elastics and nose clip. It is mainly made by cutting, sewing or heat sealing using thin-bonded non-woven fabric as raw material.

Rôle du masque / Scope

Bloque et isole efficacement les particules bactériennes, la poussière, le pollen et les bactéries. Permet d'obtenir une efficacité de filtration (BFE) pouvant atteindre plus de 95%. Les produits d'urgence en cas d'épidémie sont à utiliser pendant la période épidémique.
Effectively block and isolate bacterial particulate matter, dust, pollen and bacteria with a filtration efficiency (BFE) up to more than 95%. Epidemic emergency products are for use on during the epidemic period.

Précautions & avertissements / Precautions


1. Le produit est valable pendant 18 mois, veuillez l'utiliser pendant la période de validité.
 2. Pour un usage unique, détruire après usage.
 3. Si l'emballage est endommagé, l'utilisation est interdite.
- 1. The product is valid for 18 months, please use within the validity period.
2. For one-time use only, destroy after use.
3. If the packaging is damaged, use is prohibited*

Méthodes de stockage / Special storage

Stocker dans un endroit où l'humidité relative ne dépasse pas 80%, sans gaz corrosif et bien ventilé, éviter les températures élevées.

Store in a relative humidity not exceeding 80%, non-corrosive gas and well-ventilated room, avoid high temperature.

1

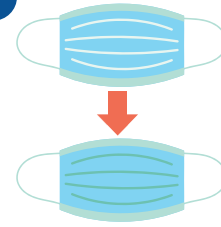

Placer à l'extérieur la face colorée.

The colored side of the mask should face away from you.

2



Placer les élastiques autour des oreilles sans toucher le centre du masque.

Hold the mask by the ear loops. Place a loop around each ear.

3



Appuyer sur la partie haute du masque, au niveau du nez, pour le rendre hermétique.

Pinch the stiff edge to the shape of your nose.

4




Attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer pour couvrir le menton.

Pull the bottom of the mask over your mouth and chin.

Pour toute aide ou information contactez-nous :

mpeuvion@beasy-world-sourcing.com
pbenguigui@beasy-world-sourcing.com

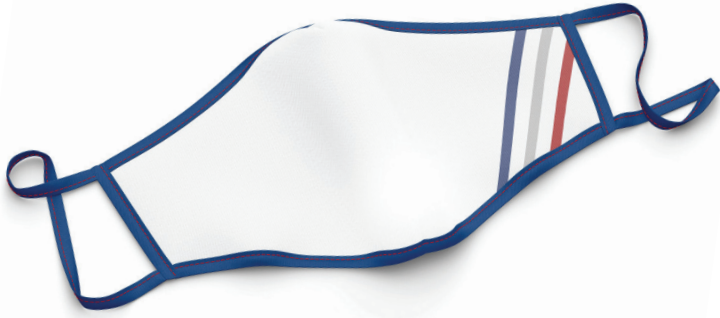

FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE LAVABLE

CONFORME AUX DIRECTIVES
DE L'AFNOR SPEC S 76-001

RÉSULTATS DE PERFORMANCE

Respirabilité : 141 L.m-2.S-1 (96 minimum demandé)

Taux de filtration : 98% (masque de catégorie 1)

STRUCTURE & COMPOSITION

Masque en tissu composé à 92% de polyester et 8% de coton avec en plus une couche intérieure 100% coton ce qui permet un confort et une protection optimale. Il est principalement fabriqué par découpage, couture ou termocollage en utilisant comme matière première le tissu évoqué précédemment.

RÔLE DU MASQUE

Bloque et isole efficacement les particules bactériennes, la poussière, le pollen et les bactéries. Permet d'obtenir une efficacité de filtration (BFE) pouvant atteindre plus de 87,4%. Les produits d'urgence en cas d'épidémie sont à utiliser pendant la période épidémique.

PRÉCAUTIONS & AVERTISSEMENTS

1. Le print de couleur n'affecte aucunement la filtration des particules.
2. Réutilisable pour plus de 20 lavages.
3. Lavable à 60°.
4. Séchage au sèche-cheveux ou au sèche-linge.
5. Si votre masque présente des trous, entaille ne pas l'utiliser.

1



Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

2



Tenez le masque par les lanières élastiques et passez les lanières élastiques derrière les oreilles.

3



Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale

Pour toutes informations contactez-nous :

mpeuvion@beasy-world-sourcing.com
pbenguigui@beasy-world-sourcing.com



Masque en tissu, à laver à 60° pendant 30 min.